

universal tray adhesive



**ADHESIVE FOR A-SILICONE
IMPRESSION MATERIAL**

Zhermack[®]
CLINICAL



Zhermack SpA
Via Bovazecchino, 100
45021 Badia Polesine (Rovigo) - Italy
tel. +39 0425 597611 - fax +39 0425 53596
www.zhermack.com - info@zhermack.com



U113384/D - Last Update 11/2009

**KLEBSTOFF FÜR ABDRUCKMATERIAL
AUF SILIKONBASIS**

TRAY ADHESIVE wurde eigens erschaffen, um die Klebekraft des Additions- (ELITE HD+, ELITE P&P, COLORISE, HYDRORISE) bei Standard-Abdruckträgern aus Metall und bei individuellen Bißlöffeln aus Kunststoff zu sichern.

ANWENDUNG:

- Die Oberflächen des Abdruckträgers müssen sauber, fettfrei und trocken sein.
- Eine dünne Schicht Klebstoff auf die Oberflächen streichen, die mit dem Abdruckmaterial in Berührung kommen.
- Etwa 2 Minuten warten oder für eine schnellere Trocknung einen Luftstrahl benutzen; dann das Silikon auftragen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit reichlich fließendem Wasser abspülen.
- Die Dämpfe nicht einatmen
- Das Fläschchen nach Gebrauch verschließen
- Das Produkt nicht in der Nähe von Flammen oder Funken aufbewahren
- Kittel oder andere Kleidungsstücke nicht mit Klebstoff beschmutzen, da er nur schlecht zu entfernen ist
- Eventuelle Rückstände mit Alkohol beseitigen
- LAGERUNG: 5-27°C (41-80°F)
- VERPACKUNG: Flasche à 10 ml

R11: LEICHTENTZÜNDLICH – R20/21: GESUNDHEITSSCHÄDLICH BEIM EINATMEN UND BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT – R38: REIZT DIE HAUT – S2: DARF NICHT IN DIE HÄNDE VON KINDERN GELANGEN – S9: BEHÄLTER AN EINEM GUT GELÜFTETEN ORT AUFBEWAHREN – S13: VON NAHRUNGSMITTELN, GETRÄNKEN UND FUTTERMITTELN FERNHALTEN – S16: VON ZÜNDQUELLEN FERNHALTEN S NICHT RAUCHEN – S46: BEI VERSCHLUCKEN SOFORT ÄRZTLICHEN RAT EINHOLEN UND VERPACKUNG ODER ETIKETT VORZEIGEN – S36/37: BEI DER ARBEIT GEEIGNETE SCHUTZHANDSCHUHE UND SCHUTZKLEIDUNG TRAGEN.

NUR FÜR ZAHNÄRZTLICHE ANWENDUNG